

# Snabbreferenshandbok till BeneHeart AED-enhet i C- och S-serien


1



Kontrollera att patienten är okontaktbar och inte andas eller endast flämtar.

**RING AMBULANS!**



2

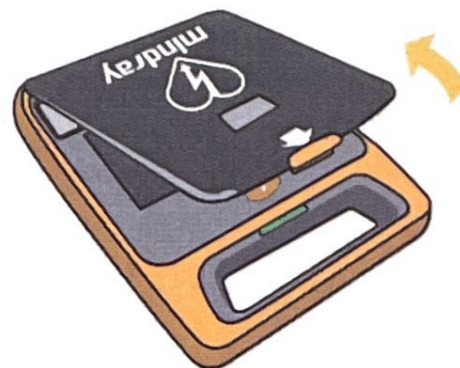

Öppna AED-enhetens lock.

3


Sätt fast elektroderna.

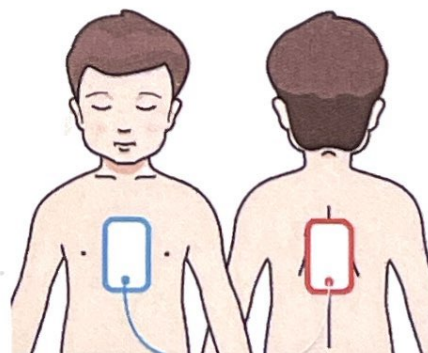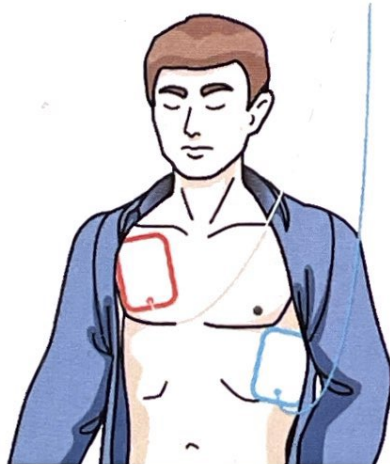

## Om stöt rekommenderas

Helautomatisk modell:  
AED-enheten ger automatiskt patienten en stöt.

Halvautomatisk modell:  
Tryck på stötknappen inom 30 sekunder.

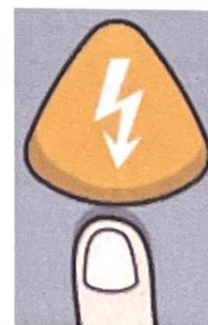


4

Administrera en stöt.

## Om stöt inte rekommenderas

Utför hjärt-lungräddning enligt anvisningarna.

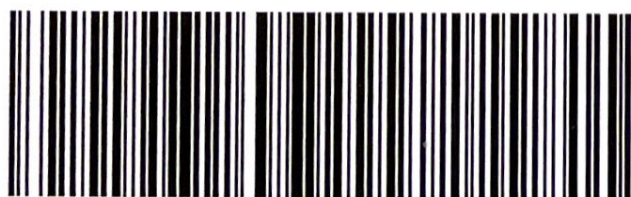

046-017686-00 (2. 0)

**mindray**